



ТОВ «ОЛІМП-МЕДСЕРВІС»
04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12а
ЄДРПОУ 38392512
Р/р UA723510050000026008501960800
в ПАТ "УкрСиббанк", м. Київ, МФО 351005
тел. +38 (068) 229-48-38
www.olympus.kiev.ua

OLYMPUS

ДОВІДКА

щодо питання про термін служби гнучких ендоскопів Olympus і рекомендованих термінів сервісного обслуговування ендоскопів

Підприємство-виробник не встановлює нормативів на ресурс ендоскопів в післягарантійний період. Це пояснюється тим, що термін служби окремих частин апаратів, як і ендоскопів в цілому, сильно залежить від умов експлуатації, а саме від техніки і методики застосування, щоденного навантаження і особливо від використовуваних на практиці процедур чищення, дезінфекції та стерилізації.

Разом з тим існують рекомендації з проведення обслуговування та ремонтів ендоскопів, які розроблені для широкого кола користувачів. Ці рекомендації ґрунтуються на досвіді проведення дрібних, крупних та капітальних ремонтів ендоскопів технічними службами компанії Olympus і надаються в припущенні повного дотримання вимог інструкції по експлуатації, середнього рівня навантаження (близько 10 процедур в день) і відсутності механічних пошкоджень. Таким чином, заміну слід проводити у такі терміни:

№	Заміна витратних матеріалів та запасних частин	Рекомендації щодо терміну проведення ремонту	Рекомендації щодо терміну проведення ремонту по кількості досліджень	Категорія ремонту
1	Заміна дистальної гуми ендоскопа	Рекомендується проводити не рідше 1 разу на рік або по факту зносу гуми (потертість, перфорація)	Через 1000-1500 досліджень	Дрібний ремонт, група Е
2	Заміна дистальної секції, що згинається, а також каналів і сорочки ендоскопа	Рекомендується проводити в середньому через 3-3.5 роки	Через 3000-4000 досліджень	Крупний ремонт, група D або група С
3	Заміна дистальної головки	Рекомендується проводити за фактом виявлення несправності цих елементів	Через 4000-10000 досліджень	Капітальний ремонт, група В
4	Заміна оптоволоконних джгутів підсвічування і зображення	Рекомендується проводити за фактом виявлення несправності цих елементів	Через 4000-10000 досліджень	Капітальний ремонт, група А

Слід зазначити, що ці дані є середньостатистичними і їх не слід розглядати в якості нормативів. При визначенні категорії ремонту ендоскопа і кожному окремому випадку необхідно враховувати реальну ступінь зносу вузлів і деталей апарату.

Провести безкоштовну діагностику і оцінити технічний стан вашого ендоскопа вам допоможуть фахівці сервісного центру з ремонту медичного ендоскопічного обладнання Olympus за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12а, 2 пов., тел. +38 068 229 48 38.

З повагою,
Директор сервісного центру
Жуков А.І.